

Manipulateurs séries NUHS, fiche d'installation

Modèles: NUHS1B-H, NUHS3B-H, NUHS3B6-H, NUHS7B-H, NUHS14B-H

Figure 1: Manipulateur avec jack 3.5mm pour écouteur



Description

Les manipulateurs, série NUHS, offrent aux patients une connexion avec le personnel soignant, ainsi que les commandes audio TV. Le manipulateur est équipé de l'audio (uniquement le modèle à 14 boutons, NUHS14B-H) ainsi qu'un fonctionnement facile des touches. Tous les manipulateurs sont étanches pour éviter que des agents infectieux ne pénètrent dans celui-ci. Ils sont conçus pour être utilisés dans un environnement enrichi en oxygène. Les modèles avec télécommande peuvent être facilement programmés pour différents téléviseurs.

Les références suivantes sont couvertes dans cette fiche d'installation (version FR):

- NUHS1B-H, manipulateur 1 bouton
- NUHS3B-H, manipulateur 3 boutons
- NUHS3B6-H, manipulateur 3 boutons, 6.0m
- NUHS7B-H, manipulateur 7 boutons
- NUHS14B-H, manipulateur avec commande TV à distance

Prise magnétique Ascom SafeConnect

La prise du manipulateur fournit la connexion de câblage à l'unité tête de lit. La fiche ne s'insère dans le logement que d'une seule façon pour assurer une bonne connexion.


Figure 2: Prise magnétique Ascom SafeConnect



Deux des coins de la prise ont une partie plate pour éviter toute installation incorrecte. Les parties plates de la fiche doivent être alignées avec les parties plates du logement. Voir figure 3

Note: La prise incorpore un aimant qui assume la fonction de détachement/libération. Si la prise du manipulateur dépasse les limites de la force magnétique, celle-ci se libère et se détache de son logement afin d'éviter tout dommage.

Figure 3: Orientation de la prise magnétique SafeConnect

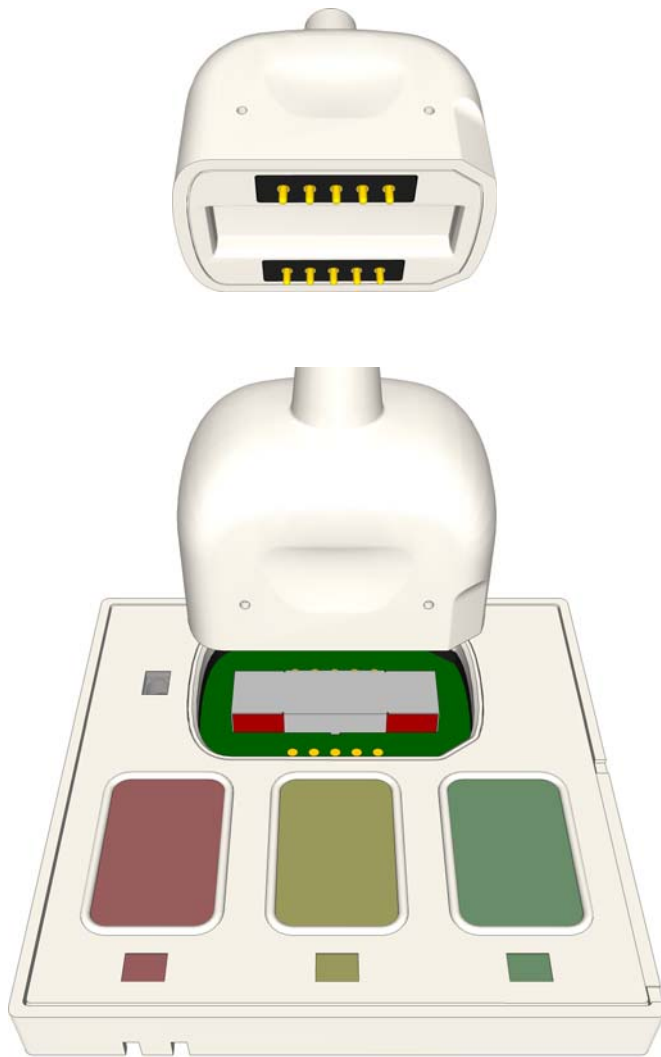

Note: Les codes infrarouges pour communiquer avec différents fabricants de téléviseurs doivent être configurés dans l'outil logiciel de configuration. L'unité tête de lit enverra alors les données via la connexion du manipulateur.

Spécifications

Fils /terminations	Prise Ascom SafeConnect
--------------------	-------------------------

Installation

Tous les manipulateurs doivent être connectés à une unité tête de lit dans les chambres et être positionné sur le lit d'un patient pour leur utilisation.

1. Insérez la prise du manipulateur de l'extrémité du cordon dans la prise/logement de l'unité tête de lit.
2. Assurez-vous que la prise est correctement orientée et positionnée.
3. Tester toutes les fonctionnalités suivant les versions de manipulateur:
 - Appel
 - Commande d'éclairage (si utilisé)
 - Commande volet roulant (si utilisé)
 - Commande TV à distance (si utilisé)
 - Commande Audio TV (si utilisé)